



## Antigenní rychlotest určený pro sebetestování.

### Postup testování:

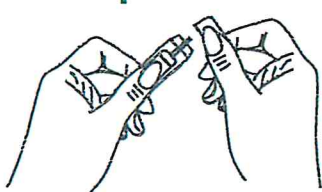


1

Otevřete lahvičku s roztokem otočením horního křídélka.

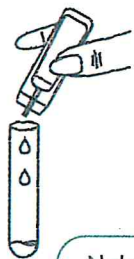


2

Nakapejte celý roztok do zkumavky

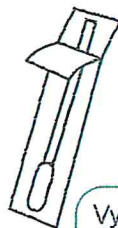


3

Vyjměte výtěrovou tyčinku z balení a nedotýkejte se její špičky!

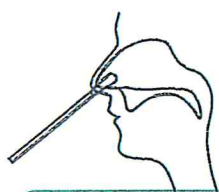


4

Vložte výtěrovou tyčinku do jedné nosní dírky, 1-2 cm hluboko.

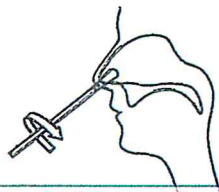


5

Otáčejte s výtěrovou tyčinkou v kruhovém pohybu okolo celé vnitřní strany nosní dírky. Toto zopakujte 5x.

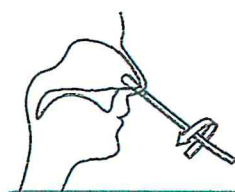

6

Opakujte stejný proces v druhé nosní dírce použitím té samé výtěrové tyčinky.

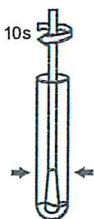

10s

7

Výtěrovou tyčinku vložte do zkumavky s roztokem a 10 vteřin s ní ve zkumavce otáčejte.


Zkumavku při vyndávání výtěrové tyčinky stlačte, aby z ní vyteklo co nejvíce tekutiny do zkumavky.

8




9

Na zkumavku nasaďte špičku s kapátkem.

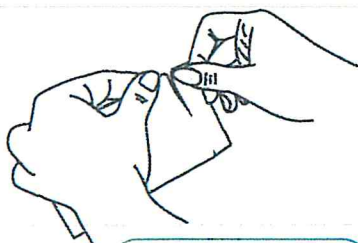

10


Otevřete sáček s testovací kazetou.

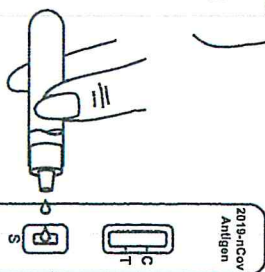

11

Ze zkumavky nakapejte 2 kapky roztoku do jamky testovací kazety.

12

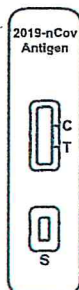

Do 20 minut uvidíte výsledek testu.

## NEGATIVNÍ VÝSLEDEK

Ukáže-li test negativní výsledek, může se testovaný dále účastnit výuky bez omezení.


## POZITIVNÍ VÝSLEDEK

Pokud test ukáže pozitivní výsledek, musí být testovaný neprodleně separován v jiné místnosti a veškeré plochy, části nábytku i věci, kterých se testovaný mohl dotýkat, musí být ihned ošetřeny dezinfekčními prostředky.

### Interpretace výsledku testu:



Negativní výsledek

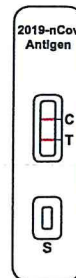

Pozitivní výsledek



Neplatný výsledek

